

HU

ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ
LÉPÉSEKHEZ

iCare HOME2



Útmutató az első
lépésekhez

icare

iCare HOME2 – Útmutató az első lépésekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta az iCare HOME2 készüléket, a saját szemnyomás mérésének ideális eszközét. Az iCare HOME2 tonométer segítségével a páciensek saját maguknak mérhetik intraokuláris nyomásukat. Az iCare HOME2 forradalmasítja a glaukóma (zöldhályog) ellátását, mivel használatával éjjel-nappal nyomon követhető a szemnyomás változása.

Az iCare szoftver grafikus formátumban nyújt átfogó képet a szemnyomásmérés eredményeiről. A mérési eredmények könnyen elérhetők okostelefon vagy webböngésző használatával. Az iCare HOME2 pácienseknek szánt tonométer azonban önmagában is használható. A tonométer az utolsó 100 mérési eredményhez biztosít hozzáférést.

Az iCare HOME2 és az iCare szoftver használatának első lépéseihez:

1. Kövesse a jelen útmutató 1. fejezetében található utasításokat a tonométer nyelvének, dátumának és idejének beállításához. Ezáltal a szemnyomásmérési eredményeket a rendszer a megfelelő helyi dátum- és időpontadatokkal tárolja el.
2. Kövesse az iCare HOME2 gyors használati útmutatójában szereplő utasításokat, hogy megtudja, hogyan végezhet méréseket az iCare HOME2 segítségével. Kérjük, tekintse meg az iCare HOME2 felhasználói oktatóvideóját is, amelyet az iCare HOME2 hordozótáskájában lévő USB-memóriakártyán talál.
3. Páciensek számára: az iCare HOME2 iCare szoftverrel történő használatához kövesse a jelen útmutató 2. és 3. fejezetében szereplő utasításokat.
4. Egészségügyi szakemberek számára: az iCare HOME2 iCare szoftverrel történő használatához kövesse a jelen útmutató 2. és 4. fejezetében szereplő utasításokat.










Az iCare HOME2 és az iCare szoftver használati útmutatóját és gyors használati útmutatóját az iCare HOME2 termékcsomagban találja.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon az iCare forgalmazójához, egészségügyi szakemberéhez, vagy írjon a home-software-support@icare-world.com címre.


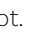








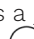


1 Nyelv, dátum és idő beállítása







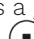



1.1 Nyelv beállítása


1. A tonométer bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot.
2. Nyomja addig a  gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **SETTINGS** (Beállítások) lehetőség.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy a  gombot, amíg meg nem jelenik a **LANGUAGE** (Nyelv) lehetőség.
5. Nyomja meg a  gombot a nyelv módosításához.
6. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt nyelvet nem látja, majd nyomja meg a  gombot.

1.2 Dátum beállítása

7. A dátum módosításához használja addig a  vagy a  gombot, amíg a **DATE** (Dátum) lehetőség nem jelenik meg.
8. Nyomja meg a  gombot.
9. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt dátumformátumot nem látja, majd nyomja meg a  gombot.
10. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt évszámot nem látja, majd nyomja meg a  gombot.
11. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt hónapot nem látja, majd nyomja meg a  gombot.
12. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt napot nem látja, majd nyomja meg a  gombot.

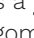1.3 Idő beállítása

13. Az idő módosításához használja addig a  vagy a  gombot, amíg a **TIME** (Idő) lehetőség meg nem jelenik.
14. Nyomja meg a  gombot.
15. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt időformátumot nem látja, majd nyomja meg a  gombot.
16. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt időzónát nem látja, majd nyomja meg a  gombot.
17. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt órát nem látja, majd nyomja meg a  gombot.
18. Váltogasson addig a  és a  gomb segítségével, amíg a kívánt percet nem látja, majd nyomja meg a  gombot.

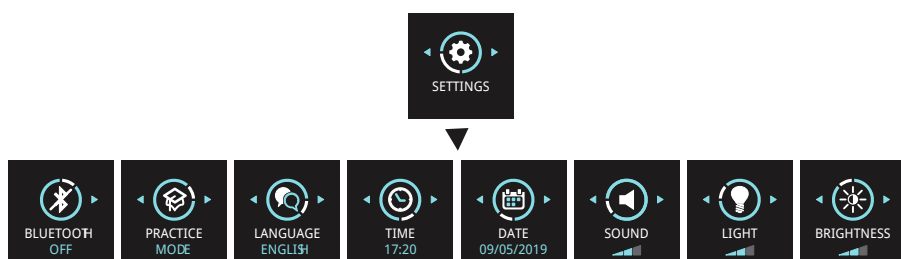


2 Az iCare szoftverrendszer áttekintése

Az iCare szoftverrendszer a következőkből áll:

- iCare HOME2 tonométer, amely a szemnyomás páciens által végzett mérésére szolgál.
- iCare CLINIC felhőalapú szoftverszolgáltatás, amelyet egészségügyi szakemberek kezelnek. Az iCare CLINIC segítségével az egészségügyi szakember és a páciens böngészőn keresztül megtekintheti és elemezheti az iCare HOME2 által mért eredményeket.
- iCare CLOUD, amely a páciensek számára készült azzal a céllal, hogy létrehozhasanak egy privát fiókot az iCare HOME2 által mért eredmények tárolására.
- iCare PATIENT2 mobilalkalmazás, amely a páciensek számára készült a szemnyomásmérési adatok megtekintése céljából. Az iCare PATIENT2 alkalmazást páciensek és egészségügyi szakemberek egyaránt használhatják, hogy feltöltsék az adatokat az iCare CLINIC-re vagy az iCare CLOUD-ba.
- iCare EXPORT alkalmazás számítógépre Windows operációs rendszerhez. Az iCare EXPORT a szemnyomásmérési adatok megtekintésére és az adatok iCare CLINIC-be vagy az iCare CLOUD-ba való feltöltésére használható.

MEGJEGYZÉS! Az iCare HOME2 tonométer csatlakoztatható az iCare CLINIC-hez vagy az iCare CLOUD rendszerhez, de mindkettőhöz nem. A páciensek mérési adataikat egy saját fiókban tárolhatják az iCare CLOUD-ban, ha tonométerük nincs regisztrálva egészségügyi szakemberük iCare CLINIC-fiókjában.

iCare HOME2 – alkalmazási lehetőségek

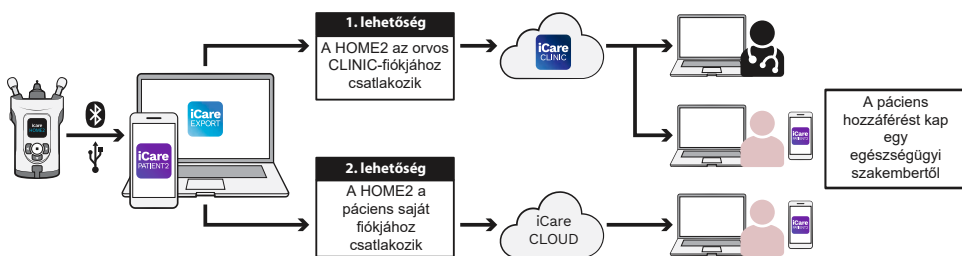

3 A páciensek számára

Az iCare HOME2 regisztrálása és az iCare szoftver használatának megkezdése

Ahhoz, hogy az iCare HOME2 mérési eredményeit okostelefonon vagy webböngészőben megtekinthesse, az iCare HOME2 tonométert regisztrálni kell:

- egy iCare CLINIC-fiókban, illetve
- saját iCare CLOUD-fiókjában.

Forduljon egészségügyi szakemberéhez, függetlenül attól, hogy ő rendelkezik-e olyan iCare CLINIC-fiókkal, amelyhez az iCare HOME2 regisztrálva van vagy regisztrálható. Miután az iCare HOME2 eszközt regisztrálták egy iCare CLINIC-fiókban, az Önrel foglalkozó egészségügyi szakember megadhatja Önnek iCare hitelesítő adatait. Ezekkel az adatokkal Ön hozzáférhet mérési eredményeihez az iCare PATIENT2 alkalmazásban vagy egy webböngészőn keresztül.

Ha az iCare HOME2 tonométer nincs iCare CLINIC-fiókhoz regisztrálva, kövesse az alábbi lépéseket saját iCare CLOUD-fiókja beállításához:

1. Keresse fel a www.icare-world.com/cloud/registration/ oldalt
2. Kezdje az ország kiválasztásával.
3. Fogadja el a felhasználási feltételeket az összes jelölőnégyzet bejelölésével, és adja meg az e-mail-címét.
4. Kapni fog egy e-mailt. Kattintson az aktiváló linkre.
5. Végezze el a regisztrációt a weboldalon kért adatok megadásával, beleértve a választott jelszót is. A készülék sorozatszámát a tonométer hátoldalán találja.
6. A regisztrációról megerősítő e-mailt fog kapni. Az e-mail tartalmazza majd az iCare CLOUD-fiókja eléréséhez szükséges webcímet.
7. Ugyanazokkal az iCare belépési adatokkal tud bejelentkezni az iCare PATIENT2 mobilalkalmazásba is.

Az iCare PATIENT2 alkalmazásnak a tonométerrel való használatához kövesse az iCare PATIENT2 és az iCare EXPORT gyorsútmutatójában szereplő utasításokat.

Az iCare EXPORT PC-alkalmazásnak a tonométerrel való használatához kövesse az iCare PATIENT2 és az iCare EXPORT gyorsútmutatójában szereplő utasításokat. Az iCare EXPORT PC-alkalmazást az alábbi címen töltheti le:

<https://www.icare-world.com/apps/export/>

Az iCare EXPORT Windows operációs rendszerben működik.

Ha le szeretne iratkozni az iCare CLOUD szolgáltatásról, írjon a következő címre: home-software-support@icare-world.com.

4 Szakemberek számára

Az iCare szoftver használatának megkezdése

Az iCare CLINIC szoftverben kezelheti a pácienseknek kikölcsonzött iCare HOME és HOME2 tonométereket, valamint megtekinthetők, elemezhetők és jelenthetők benne a szemnyomásmérési eredmények.

További információkat az iCare CLINIC-ről a www.icare-world.com/product/icare-clinic-software/ oldalon talál.

Az iCare CLINIC szolgáltatásra való feliratkozáshoz látogasson el a következő oldalra: <https://store.icare-world.com>.

Az iCare HOME2 tonométer iCare CLINIC szolgáltatásba való hozzáadásához kövesse az iCare CLINIC, az iCare EXPORT és az iCare PATIENT használati útmutatójában az egészségügyi szakembereknek szánt utasításokat.

Az iCare EXPORT PC-alkalmazás használható a szemnyomásmérési eredmények megtekintésére. Ezenkívül egyszerű, táblázatos mérési lelet is készíthető vele.

Az iCare EXPORT PC-alkalmazás az alábbi címen tölthető le: <https://www.icare-world.com/apps/export/>

Az iCare CLINIC, az iCare EXPORT és az iCare PATIENT szakmai használati útmutatója a HOME2 termékhordozó táskájában lévő USB-meghajtón található.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

FI-01510 Vantaa, Finnország

Tel.: +358 0 9775 1150

info@icare-world.com



További információért olvassa
el a használati útmutatót.



www.icare-world.com

icare

Az iCare a Icare Finland Oy bejegyzett védjegye. A Centervue S.p.A., az Icare Finland Oy és az Icare USA Inc. a Revenio Group részét képezik, és az iCare márkát képviselik. A jelen tájékoztatóban szereplő termékek, szolgáltatások és ajánlatok közül nem mindegyik engedélyezett, illetve forgalmazott minden piacon, és a jóváhagyott címkézés és utasítások országonként eltérőek lehetnek. A termékek műszaki jellemzői a tervezés és a kiszállított csomag tartalma szerint, valamint a folyamatos műszaki fejlesztések következtében változhatnak.